

ふくよく かいてんしゃわーちえあー ぷちとーる


福浴 回転シャワーチェア プチトール

特定福祉用具
 特定介護予防福祉用具
 日常生活用具


使い方

回転座面があるから、身体の向きを変える時に
 お尻の肉がよじれない。利用者も介助者も楽。


背中が洗しやすい！

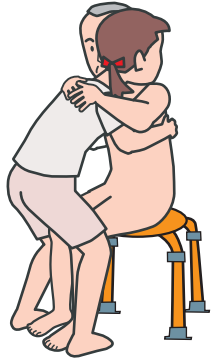

静かに回転座面の
 中央に座ります

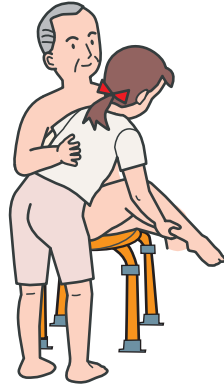

方向転換するときには
 利用者の背中を支え、
 下肢を持つと動かしやすい

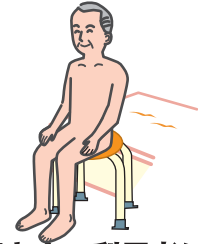

4本の脚の高さを、利用者に
 合わせて調整します
 ※全脚とも同じ高さに設定




座面クッションは外せません
 よく洗って、乾燥させてください
 ※直射日光は避けてください

ヒント



福祉用具を
 取り付けにくい
 浴槽の時

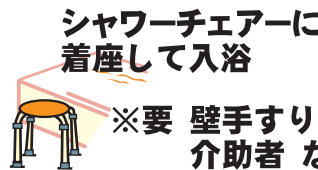

シャワーチェアに
 着座して入浴

※要 壁手すり
 介助者 など

- 各動作の合間に、ちょっと休憩
 (血圧が安定し、ふらつきません)
- 洗面所などの水回りでも
 (座って作業ができます)

データ

登録	名称	福浴 回転シャワーチェア プチトール	
	色	クリーム イエロー脚 (座面：オレンジ)	オレンジ脚 (座面：オレンジ)
	型番	FKB-06-30	FKB-06-30D
	JAN	4562304182135	4562304182203
	TAIS	01255-000007	01255-000007
	CCTA95	093303(入浴用チェア)、123006(ターンテーブル)	
仕様	高さ	34cm ~ 52cm 2.5cmピッチ × 8孔	
	座面直径	30.5cm	
	脚幅	34×34 (高さ 34cm 時) ~ 37×37cm (高さ 52cm 時)	
	重量	2.5Kg	
	耐荷重	100Kg	
材質	本体	アルミ (ポリウレタン静電粉体焼付塗装)	
	座面	EVA 発泡体	
	足先	ゴム	

⚠ 留意事項

利用者の体幹・座位安定



価格 8%税込
 17,604 円 (本体 16,300 円)

お問い合わせ

代理店 株式会社 ウェルファン
 Tel 050-2018-0956 Fax 072-834-5731

製造元 有限会社 サテライト
 Tel 0797-24-9015 Fax 0797-24-9012